



① **Rollstuhlsitzkissen Z-Flo**



1 Verwendungszweck und Beschreibung

Das Rollstuhl-Sitzkissen – **Z-Flo** – ist ausschließlich zur Dekubitusprophylaxe und -therapie bei der Benutzung im Rollstuhl vorgesehen.

Das **Z-Flo** Kissen ist für Benutzer entwickelt, die mehr Komfort wollen, als ein herkömmliches Schaumstoffkissen bieten kann.

Z-Flo besteht aus Bezug ①, Floam-Polster ②, und Schaumstoffbasis mit Luftkammer ③.

Das neuartige Polymer-Gel Floam trägt zur effektiven Druckminderung bei. Schweißnähte im Polster verhindern, daß sich der Floam in ungünstigen Bereichen ansammeln kann.

Die Schaumstoffbasis erhöht den Sitzkomfort des Kissens.

Der Luftdruck der Luftkammer ist über das Ventil zu regulieren. Wenn das Kissen nicht belastet wird, füllt sich das Luftkissen nach dem Öffnen selbsttätig. Durch Setzen auf das Kissen und gleichzeitigem Zusammendrücken des Ventils entweicht die Luft ④. Ist die gewünschte Sitzstabilität erreicht, das Ventil wieder schließen.

Nach dem Schließen des Ventils versenken Sie das Ventil in der Schaumstoffbasis, damit es mit der Oberfläche der Schaumstoffbasis abschließt.

2 Tips zu Ihrer Sicherheit

Lassen Sie niemals scharfe Objekte mit der Kissenoberfläche in Kontakt kommen.

Setzen Sie das Kissen nicht längere Zeit Temperaturen von mehr als 55 °C aus.

Falls das Kissen längere Zeit Temperaturen von weniger als 0 °C ausgesetzt wurde, müssen Sie überprüfen, wie sich das Floam-Polster anfühlt.

Falls es sich hart anfühlt, kneten Sie es mit den Händen, bis es wieder locker wird.

Legen Sie das Kissen auf den Stuhl.

Das "**back**"-Etikett, an der Unterseite des Kissens angebracht, muß in Richtung der Rückenlehne zeigen.

Das Kissen ist mit den zwei Bändern einfach an den Rückenrohren zu fixieren.

Die Kanäle für die Beführung müssen nach vorne zeigen.

3 Funktionskontrolle und Pflege

Täglich:

Lockern Sie das **Z-Flo** Kissen auf, indem Sie das Polymer-Gel des Floam-Polsters von den Seiten aus in Richtung Kissenmitte drücken.

Dabei sollte das Kissen im Bezug bleiben.

Da der Floam unter Einwirkung seines eigenen Gewichtes nicht fließt, trägt diese Maßnahme dazu bei, daß sich ein Maximum an Floam unter dem Benutzer befindet.

Monatlich:

Zur Überprüfung des Floam können Sie den Kissenbezug abnehmen. Lösen Sie die vier elastischen Bänder, die das Floam-Polster auf der Schaumstoffbasis fixieren, und überprüfen Sie dann, ob die Floam-Zelle intakt ist.

Zusammenbau:

Achten Sie darauf, daß das Ventil in der Schaumstoffbasis nach vorne und unten zeigt. Das "**back**"-Etikett des Floam-Polsters muß in Richtung der Rückenlehne zeigen. Die Kanäle für die Beführung müssen nach vorne zeigen.

Dann den Bezug überziehen und das Kissen wieder festbinden.

Bezug:

1. Wenden Sie den Bezug zum Reinigen.

2. Waschen Sie ihn im Schongang bei 30 °C mit einem milden, umweltfreundlichen Waschmittel. Nicht Bleichen.
3. Im Schongang trocknen. Nicht zu sehr erwärmen.

Schaumstoffteile

Es wurde hochqualitativer Schaumstoff mit offenen Zellen verwendet, der besonders langlebig und komfortabel ist. Er absorbiert Feuchtigkeit und Gerüche. Bei starker Inkontinenz sollte ein zusätzlicher Inkontinenzbezug verwendet werden.

4 Gewährleistung

Eine Gewähr kann nur übernommen werden, wenn das Produkt unter den vorgegebenen Bedingungen und zu den vorgesehenen Zwecken eingesetzt wird.

5 Konformitätserklärung

Otto Bock erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung, daß das Rollstuhl-Sitzkissen **Z-Flo** mit den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG übereinstimmt.

Otto Bock

HEALTH CARE

Rehabilitation und Pflege
Max-Näder-Straße 15 · D-37115 Duderstadt
Tel.: +49-5527-848-0 · Fax: +49-5527-848 14 60
e-mail: reha@ottobock.de · www.ottobock.de



Otto Bock ist ein von der DQS
zertifiziertes Unternehmen
nach DIN EN ISO 9001, Reg. Nr. 779
(Managementsystem)